

优眼新打印程序

使用说明

V1.0.0

一. 注意事项

- 本打印程序暂支持 Windows7(64Bit)、Windows10(64Bit) 、Windows11(64Bit)
- 本程序需提前安装好打印机， 打印机能够打印出测试页


二. 下载与安装

1.通过链接地址 <https://uyu.com/x.html> 下载打印程序安装包后双击进行安装




2.点击下一步进行安装，可选择安装目录




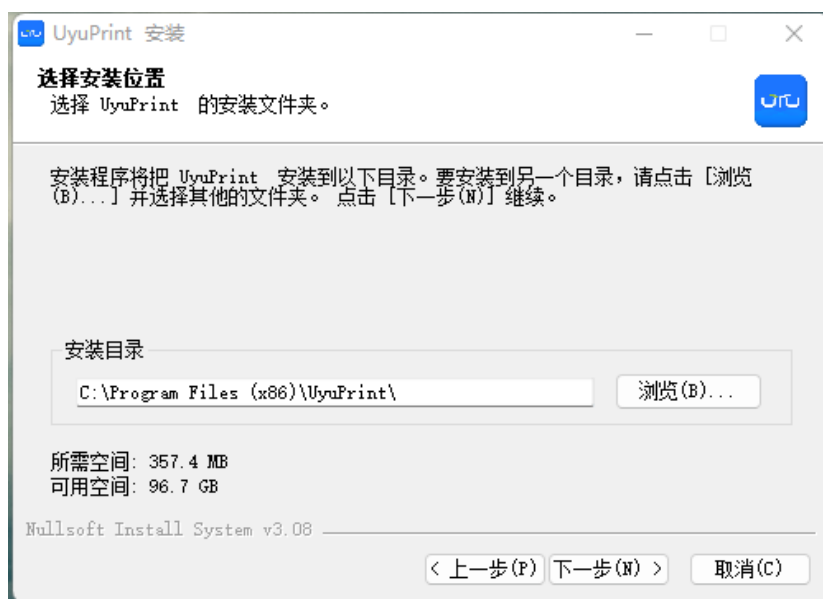

3. 点击安装

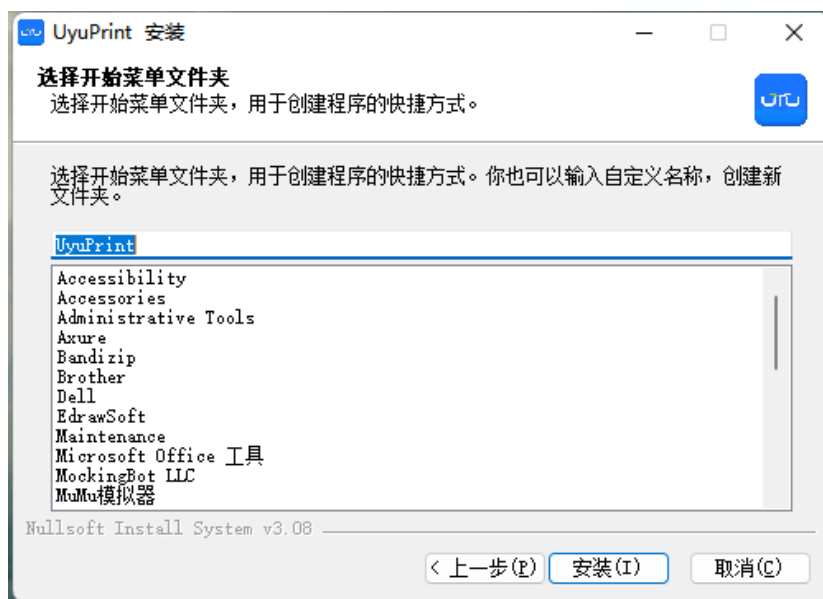

4. 点击完成及为安装成功

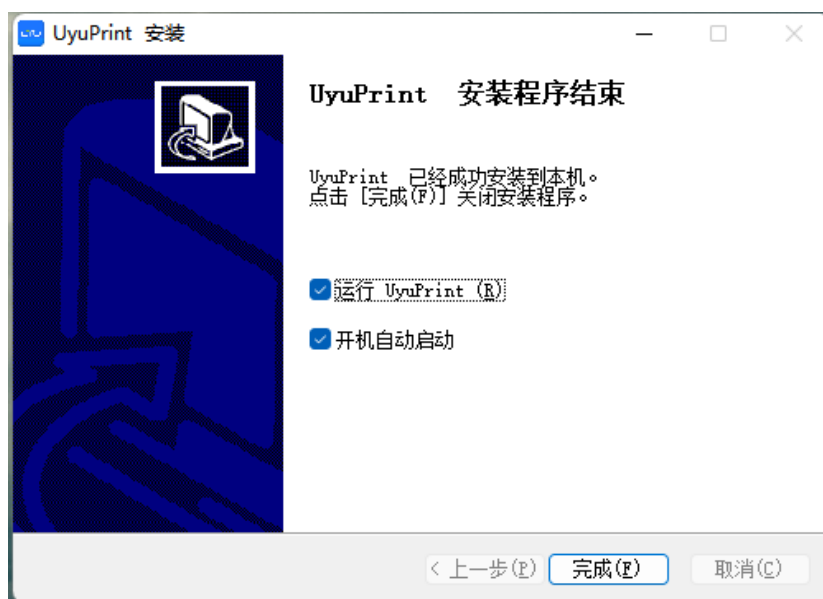

三. 基础使用


1. 双击 UyuPrint 快捷方式打开应用




2. 输入所在门店账号及密码后进行登录，可点击记住密码后下次登录免输入密码




3.主页面为文件列表页，初始状态为

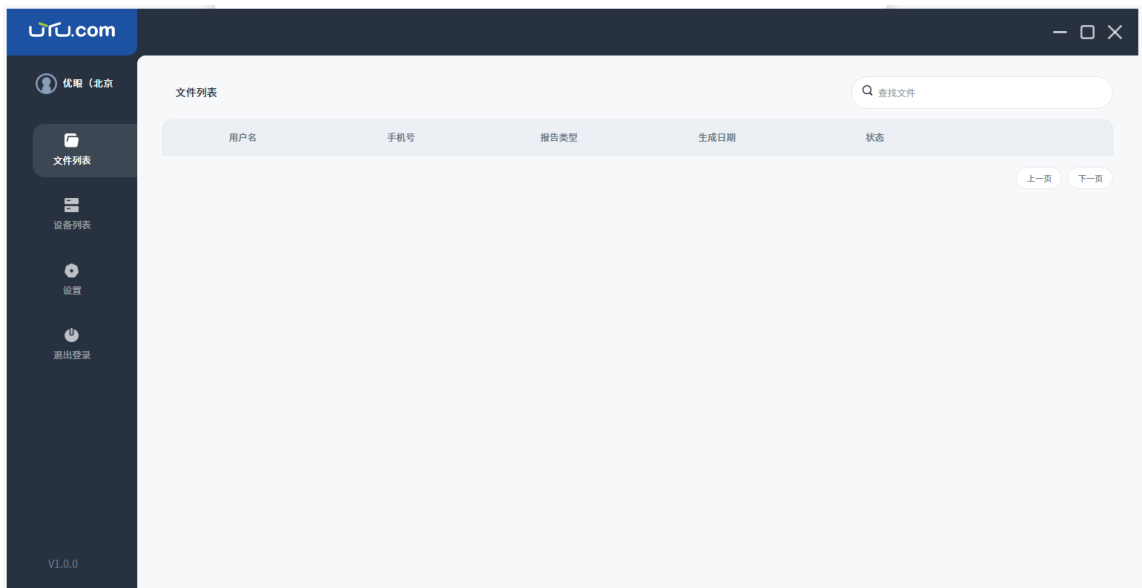


4.点击设备列表页面，将需要打印功能的设备进行绑定，绑定后提示绑定成功，绑定后的设备可在检查后进行报告打印

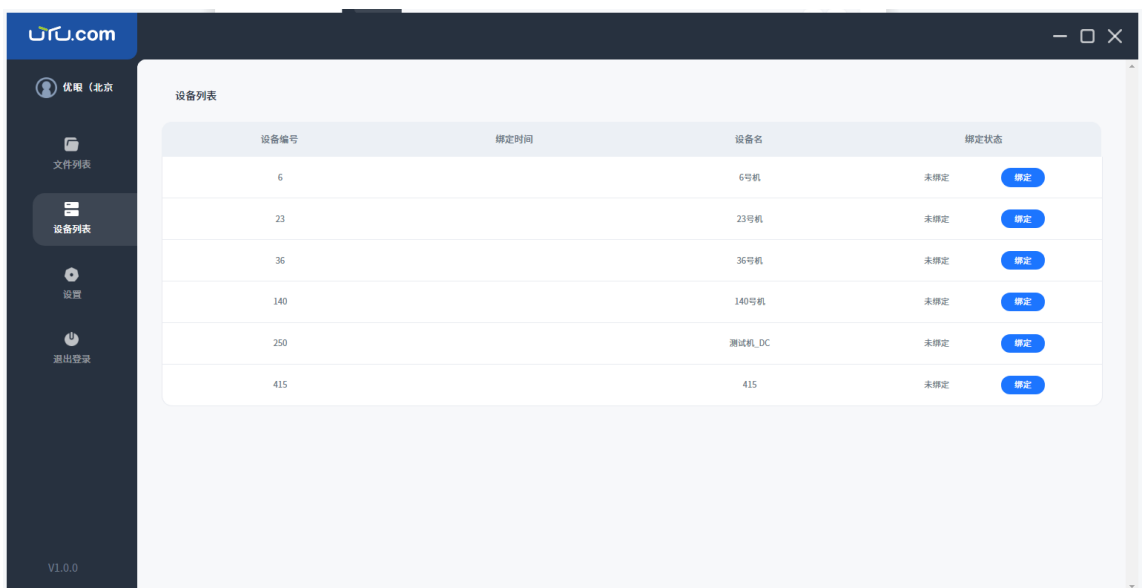


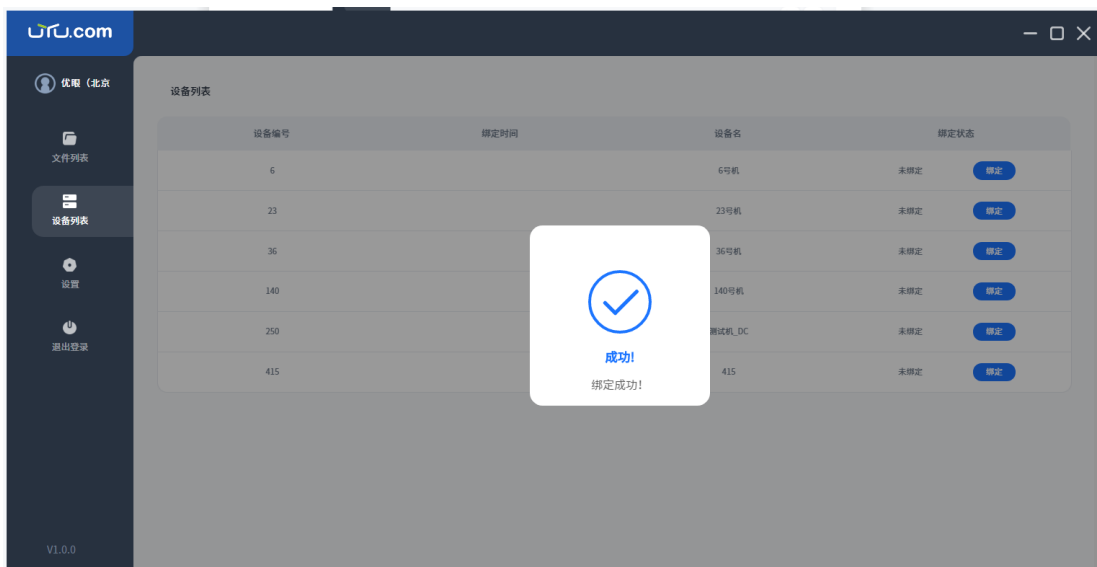

5. 绑定设备后也可进行解绑

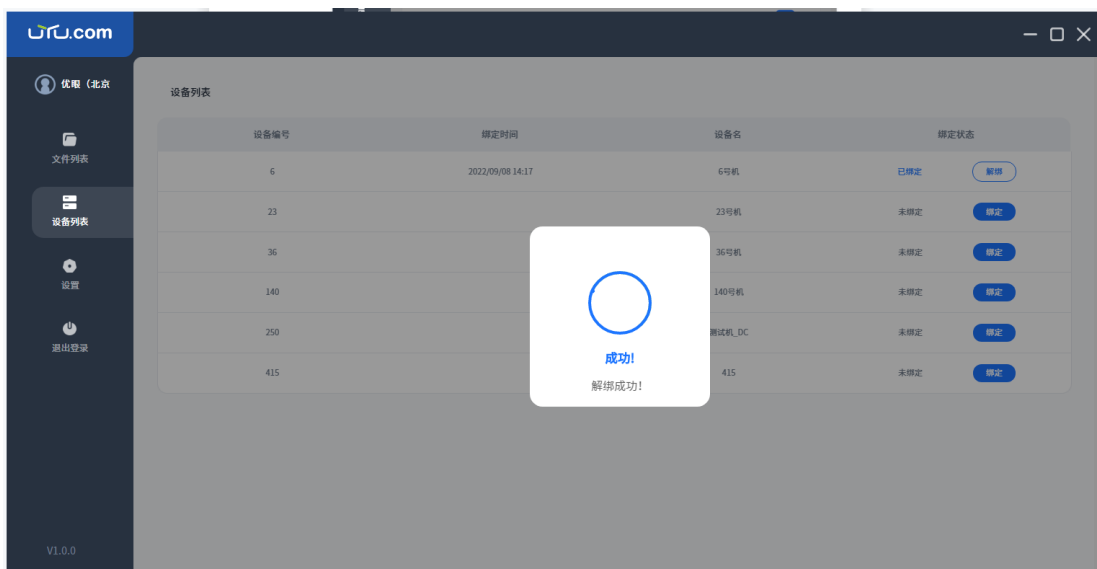


6. 使用优眼二代检查仪打印报告时，打印程序中文件列表显示当前打印文件及历史打印文件，并显示报告所属用户，用户手机号，报告类型，生成时间的关键信息

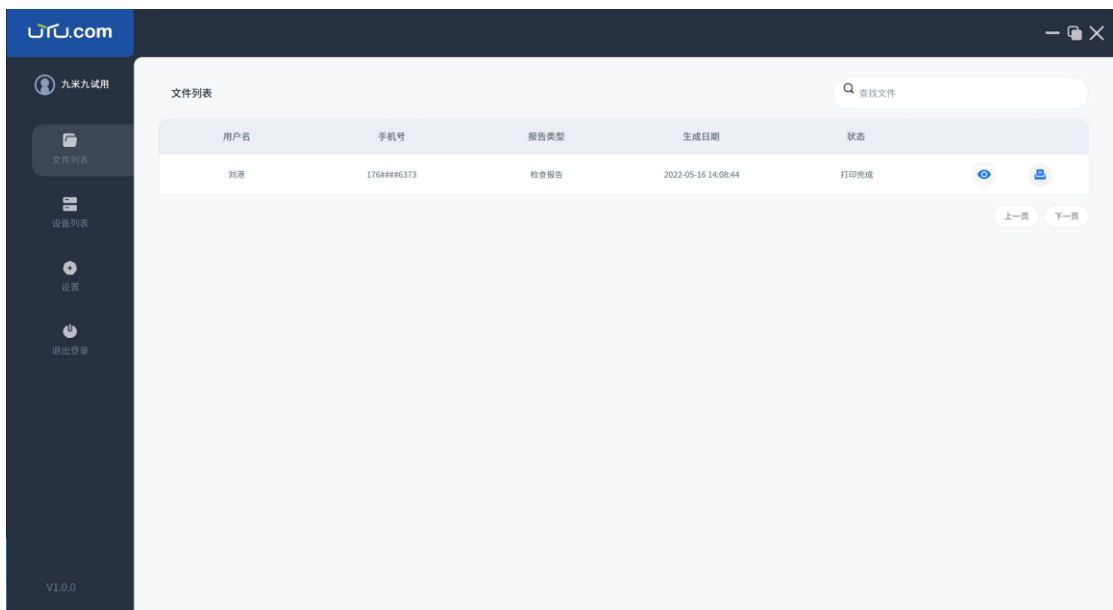

四. 更新与其他

1. 点击设置后可进行软件更新

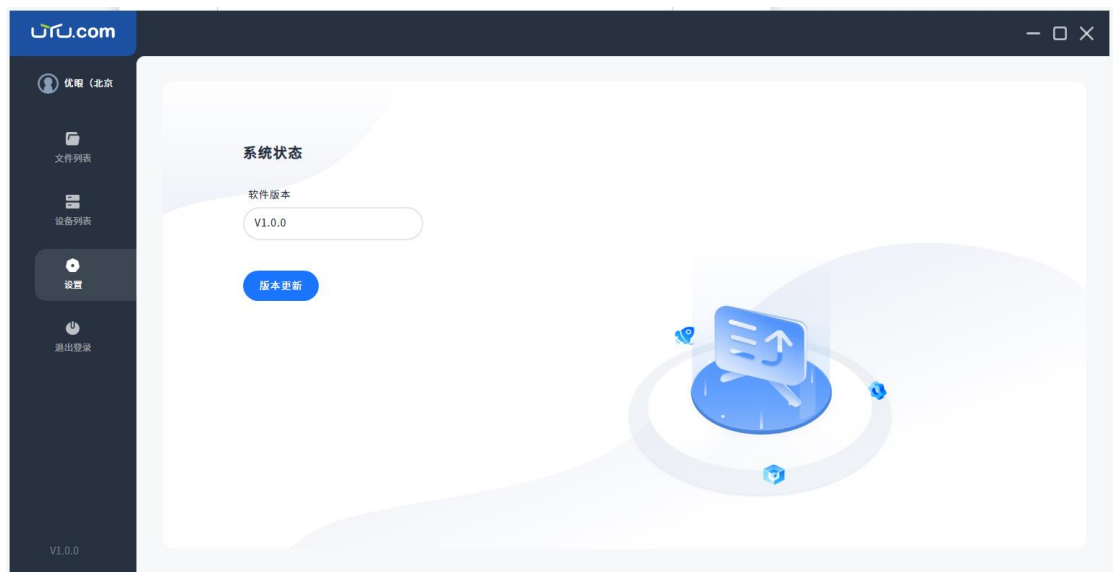

2. 点击版本更新弹出更新状态弹窗，点击更新按钮即可进行打印程序更新

